

CLOVER[®] A1c[™] Self

Alat pengukuran HbA1c

MUDAH, CEPAT dan EFISIEN

Sertifikasi Oleh:



 catalogue

 catalogue



Test Cartridge

KEMENKES RI AKL 20207126095



Clover A1c Self Analyzer

KEMENKES RI AKL 20207126080



Cepat

Hasil real-time dalam 5 menit.



Mudah Digunakan

Otomatis dan mudah, cukup 3 langkah pengoperasian.

Hanya dibutuhkan 4 µl sampel darah.



Akurat

Sertifikasi ganda IFCC & NGSP

Interferensi minimal dari hemoglobinopati.

Korelasi dengan metode laboratorium.



Aman



Kartrid uji mandiri.

Tidak perlu reagen tambahan.



MADE IN KOREA

EVALUASI

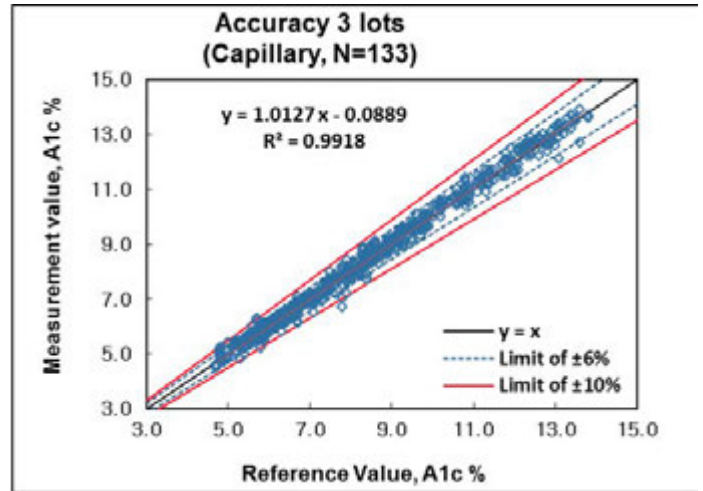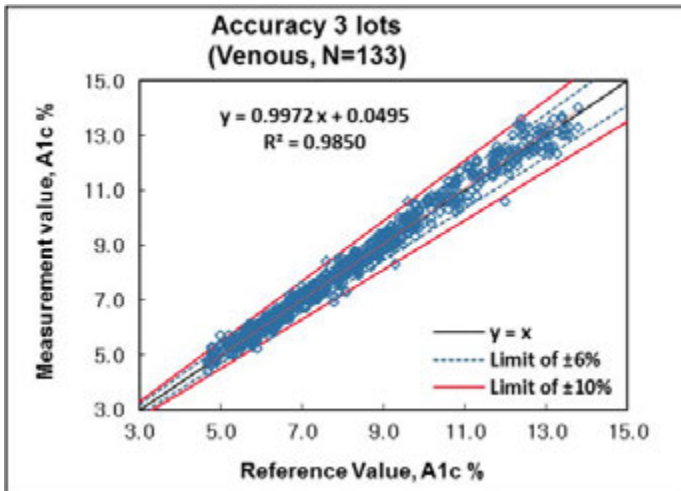

SPESIFIKASI

Sample Darah	darah utuh kapiler, darah vena dengan anti koagulan
Volume Sample	4µl
Waktu Pengukuran	5 menit
Rentang Pengukuran	20 ~ 130 mmol / mol (IFCC), 4.0 ~ 14.0 % (NGSP)
Suhu Penyimpanan	meter 10 ~ 35°C (50 ~ 95°F), cartridge 2 ~ 32°C (36 ~ 90°F)
Panjang Gelombang	415 nm (normal)
Kelembaban Relatif	10% ~ 90%
Daya Listrik	DC 9V-2 A
Suhu Operasional	200*198*139(mm)/ 1.4kg
Dimensi & Berat	17 ~ 32°C (63 ~ 90°F)
Option	PC Application Software, Barcode Scanner (User ID), Thermal Printer, Blood Glucose Module Enable to connect blood glucose module


CARA PENGGUNAAN




- 1) Buka penutup alat saat dalam mode "stand-by"
- 2) Masukkan test kartrid
- 3) Kocok reagent pack 5 - 6x
- 4) Masukkan sampel darah ke reagent pack sebanyak 4 µl



- 5) Masukkan reagent pack ke dalam kartrid pada alat
- 6) Tutup penutup alat

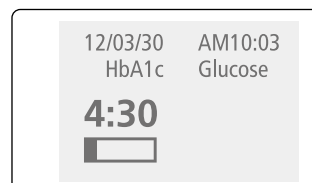

- 7) Alat akan bekerja otomatis dan menghitung mundur selama 5 menit

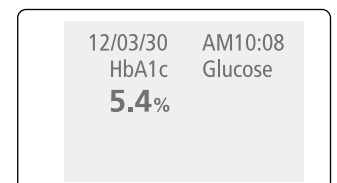

- 8) Hasil pengukuran ditampilkan dalam satuan % HbA1c

Diimport & distribusi oleh:



Rukan Graha Cempaka Mas E15
 Jalan Letjend Suprpto No. 1 Jakarta Pusat
 Telp: 021 - 4250665, Fax: 021 - 4250703
 Email: medisindo@medisindo.co.id, Website: www.medisindo.co.id

Sub-distributor: