

Insulin Pen Needle

e**catalogue** 



KEMENKES RI AKL 20902220917

GlucoDr Insulin Pen Needle adalah jarum insulin sekali pakai yang dapat digunakan dengan pena insulin. Diproduksi dengan menggunakan teknologi modern untuk hasil jarum yang berkualitas dan aman.



GlucoDr.
Insulin Pen Needles
32G (0.23) x 4 mm



32G(0.23mm) x 4mm



GlucoDr.
Insulin Pen Needles
31G (0.25) x 6 mm



31G(0.25mm) x 6mm



GlucoDr.
Insulin Pen Needles
31G (0.25) x 8 mm



31G(0.25mm) x 8mm

- Dengan perekat yang menjamin keamanan saat penggunaan.
- Jaminan jarum tidak mudah bengkok saat penggunaan.
- Jarum dengan bentuk geometris untuk memudahkan saat digunakan.
- Lapisan dinding kanula yang tipis mengurangi rasa sakit waktu injeksi.


The Smart Choice for Medical Devices

BEBAS ZAT TOKSIK, BEBAS PIROGEN, BEBAS LATEX, DISTERILISASI MENGGUNAKAN GAS EO


CARA PENGGUNAAN




1. Lepaskan kertas penutup jarum

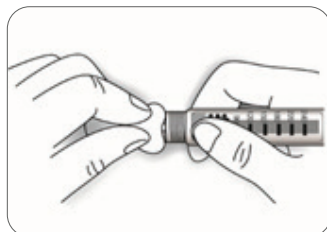

2. Bersihkan insulin pen dengan alcohol swab

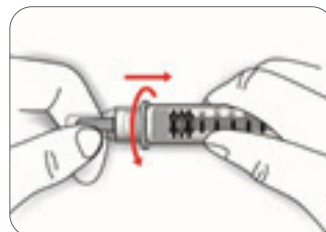


3. Pasang jarum ke insulin pen dengan posisi sejajar dan putar ke arah kanan

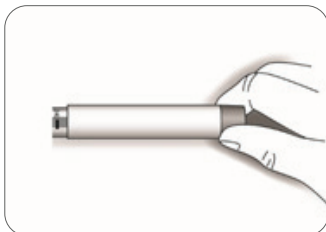


4. Atur dosis pada insulin pen (UNIT) sesuai resep dokter



7. Lepaskan tutup jarum. Posisikan pen secara tegak dan tekan pen sedikit untuk memastikan tidak ada sumbatan pada jarum

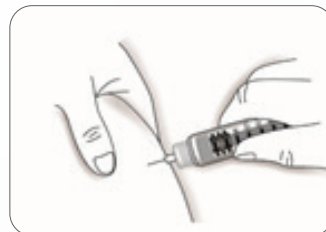

8. Bersihkan bagian tubuh yang akan diinjeksi dengan alcohol swab dan injeksikan pada posisi 90°

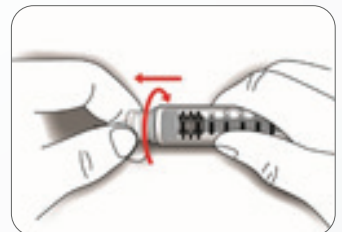

9. Setelah injeksi, tutup jarum dengan pelindung luar, dan putar ke kiri untuk melepaskan jarum dari insulin pen

SERTIFIKASI

CE Directive | CE ISO 9001:2008 | CE ISO 13485:2003 | CE ISO 13485:2012
Certificate of GMP | FDA Listing | KFDA CFS | CFDA



Imported & distributed by :

MEDISINDO BAHANA

Rukan Graha Cempaka Mas E15 | Jl. Letjend Suprpto No.1 Jakarta Pusat

Telp : 021-4250665, Fax : 021-4250703

✉ medisindo@medisindo.co.id 🌐 www.medisindo.co.id

Sub-Distributor :