



1. Masukkan strip ke dalam alat



2. Pastikan kode pada alat sama dengan kode pada botol strip



3. Gunakan lancing device untuk mengambil sampel darah



4. Ambil 5 μ L sampel darah dengan batang kapiler



5. Teteskan sampel darah pada lubang strip hingga terdengar bunyi bip

6. Ulangi langkah (4) dengan batang kapiler baru untuk mengisi lubang strip lainnya.



7. Hasil akan ditampilkan setelah $\pm$ 2 menit

SPESIFIKASI

Tipe test	Kolesterol total (TC), trigliserida (TG), HDL, dan LDL (dihitung otomatis)
Tipe sample	Darah utuh vena dan kapiler
Volume sample	Single test 5 μ L, Multi test 15~20 μ L
Rentang pengukuran	Kolesterol total : 100~400 mg/dL Trigliserida : 50~600 mg/dL HDL : 25~80 mg/dL
Rentang hematokrit	30~55%
Rentang pengukuran	2 Menit
Suhu penyimpanan strip	2~30°C
Suhu operasional alat	18~30°C (64 ~ 86°F)
Tipe display	TN LCD
Ukuran alat	61×109×23 mm
Berat alat	77±1g (tanpa baterai)
Sumber baterai	2 pcs baterai alkalin AAA 1,5V
Masa pakai baterai	1000 kali pemakaian
Sambungan PC	Kabel data (optional)

Distributor :

Dipasarkan Oleh :



Rukan Graha Cempaka Mas E15

Jl. Letjend Suprpto No.1 Jakarta Pusat | Telp : 021-4250665, Fax : 021-4250703

✉ medisindo@medisindo.co.id 🌐 www.medisindo.co.id 📘 medisindo bahana 📷 medisindobahana

LipidPro™

alat ukur profil lipid



Cukup Satu Strip Untuk 4 Parameter

Kecil dan mudah digunakan, LipidPro menghadirkan hasil yang cepat dan akurat. Kapan saja dan di mana saja.

Kolesterol
Total



Trigliserida



HDL



LDL



MADE IN KOREA

KEMENKES RI AKL 20101126190

Sertifikasi oleh :



Sistem Autocoding
dengan sensor RFID

Lipid Pro Meter merupakan alat ukur profil lipid, untuk pengukuran kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida. Dengan sensor RFID-tag (Frequency Identification Tag) alat ini tidak memerlukan *coding* dalam pengukuran dengan hasil yang cepat dan akurat hanya dalam 2 menit.

Pengukuran Profil Lipid :

- ✓ Kolesterol Total
- ✓ HDL
- ✓ Trigliserida
- ✓ LDL (perhitungan otomatis)
- ✓ Hasil cepat hanya 2 menit
- ✓ Volume sampai 5 µL
- ✓ Sistem pengkodean strip otomatis dengan RFID
- ✓ 1 strip untuk 4 parameter



Lipid profile test strip

KEMENKES RI AKL 20101126299
Strip isi 10