

Aktivsafe Lancet

TD-5083



- Produk steril
- Mudah digunakan
- Untuk satu kali pakai
- Retraksi pegas otomatis tanpa perlu lancet
- Tidak mengandung unsur kimia berbahaya



KEMENKES RI AKL 11603027298



Isi 25 Pcs



Isi 50 Pcs



Isi 100 Pcs

Cara Pakai



Putar dan lepaskan tutup jarum.



Tekan pegas jarum pada bagian yang akan ditusuk untuk mengaktivasi lancet.



Kumpulkan sampel darah dan buang lancet yang sudah digunakan.

Spesifikasi

Ukuran Lancet	28G
Warna Lancet	Putih
Kedalaman Penetrasi	1,5 ± 0,2 mm
Penggunaan	Satu Kali Pakai

Sub-distributor :